



GlassOuse

Assistive Device

www.glassouse.com

GlassOuse Link
使用手册

设备说明

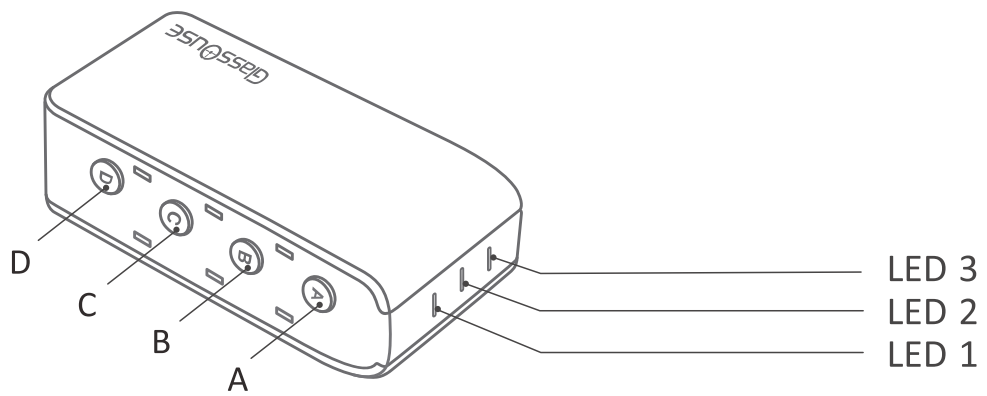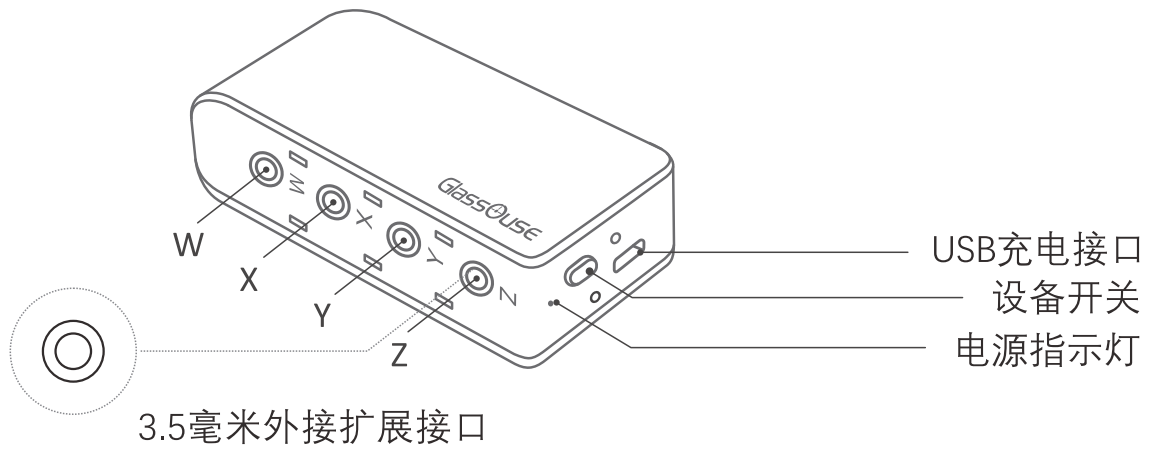

组件	说明
Power Button/电源按键	设备开关
Power LED/电源指示灯	充电状态指示
A	连接通道切换
B	短按模式切换，长按进行配对
C	灵敏度调节

组件	说明
D	复位 / 校准
LED 1	模式指示灯1
LED 2	模式指示灯2
LED 3	模式指示灯3
W, X, Y, Z	开关接口
USB 充电接口	设备充电

1. BT 4.0 连接

通过 BT 4.0 连接GlassOuse到你的设备：

- 短按“电源”键开机。
- 短按A键选择连接通道。
- 短按B键选择模式， 长按3秒LED灯闪烁即进入配对状态。
打开智能设备的 BT 4.0, 进入搜索界面， 找到 “Axxx - M1 - GlassOuse Link” 并连接。
- 连接成功， LED指示灯状态长亮。

2. 多台设备连接GlassOuse Link

- 短按A键， 指示灯会在通道对应的LED1、 2、 3间跳动。
- 选择想要连接的通道， 长按B键3秒进入配对状态， 并连接。

设备”指的是GlassOuse可以连接和控制的手機、电脑、平板电脑和智能电视等

3. 连接设备之间的切换

- 方法1:在GlassOuse Link上短按A键切换连接设备， 设备通道对应的LED1、 2、 3会亮起。
- 方法 2:将开关连接到Z插口， 点击开关即可进行设备切换。

注意：当您**将GlassOuse切换到新设备时， 它将停止在之前连接的设备上工作， 即不能同时在两台设备上工作。**


4. 在开关控制模式下使用

- 在开关模式下， GlassOuse Link 可以使用开关控制模式（开关访问）或与您的设备兼容的任何其他开关控制软件设置为外部开关。
- 可以使用 GlassOuse App 为连接到 GlassOuse Link 的外部辅助开关分配不同的按钮。
- 如要在屏幕上显示/隐藏键盘， 请激活连接到 Y 端口的辅助开关。

5. GlassOuse Link的鼠标/开关/摇杆模式

- GlassOuse Link可以作为鼠标、外置开关或摇杆。
- 每种模式都有专门的颜色:鼠标（蓝色）、开关（红色）、摇杆(绿色)

Mouse / 鼠标	蓝色
Keyboard / 开关	红色
Joystick / 摇杆	绿色

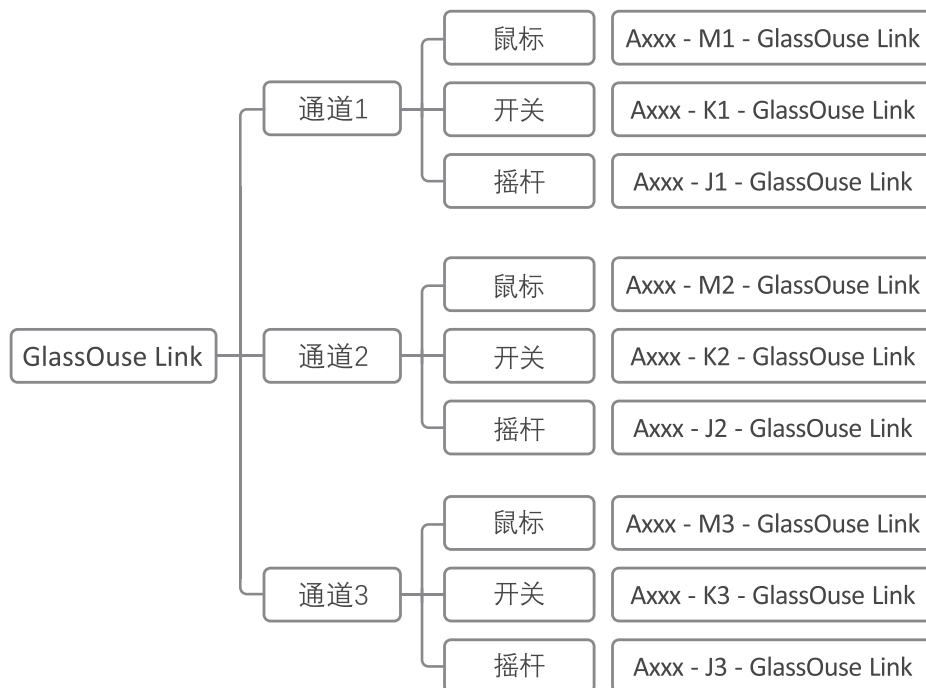

- 要切换模式，可以短按B键，切换的模式对应不同的LED灯颜色
- 再次长按B键3秒，进入配对状态，用 BT 4.0 连接。

注意：一个设备可以同时连接到任何一个功能。

6. 连接G-Switch开关

- GlassOuse Link有四个开关接口，用于连接不同按键开关。
- 支持单声道3.5mm开关以及立体声(双)3.5mm开关。您可以在一个端口连接两个具有不同命令的按键开关，以实现鼠标、开关或摇杆的更多功能。
- Z插口默认是“切换设备”，可使用GlassOuse App设置成其它功能。
- 使用GlassOuse App可以更改设置每个插口每个开关的对应功能。

7. 在 GlassOuse PRO 和 GlassOuse V1.4 中使用 GlassOuse Link

- GlassOuse Link 可以与 GlassOuse PRO（鼠标、开关和操纵杆模式）同时连接和 GlassOuse V1.4（仅限鼠标模式）在同一配对设备上，并充当它们的多辅助开关控制端口。

注意：一台设备通常支持 3-4 个蓝牙连接

- 要将 GlassOuse Link 与 GlassOuse PRO 一起使用，请确保两个 GlassOuse 都连接到同一设备且处于同一模式且处于活动状态。
- 在另一台设备上同时使用它们，请同时将 GlassOuse 切换到新设备。使用 GlassOuse APP 为所有配对设备连接到 GlassOuse Link 的辅助开关的指定功能。

8. 电量状态

- 超过15秒不工作时进入待机状态，进入省电模式。这里所有的指示灯都会熄灭。待机3分钟后，如果没有任何操作，则进入休眠状态。要唤醒设备，请按任意按钮。
- **低电量指示灯** - 电源LED会变成红色并快速闪烁。
- **充电** - 电源指示灯为红色，缓慢闪烁。
- **满电状态** - 电源指示灯为绿色。

9. 重置

长按(D + 电源键)3秒，重置清空 BT 4.0 配对信息。

10. GlassOuse APP

- 将GlassOuse Link连接到安装了应用程序的设备上，“创建帐户”登录。
- 在App中选择连接的GlassOuse Link，可以进行设置。

10.1 开关功能设置

GlassOuse Link连接上点击开关

- 打开GlassOuse APP，打开设置，然后选择“Switch Settings”。
- 点击对应的连接插孔，选择每个插孔开关对应的功能。
- 在APP里，可以设置鼠标，键盘和摇杆的相关设置。

10.2 灵敏度设置

您可以调整鼠标、键盘或摇杆的灵敏度:

- 在GlassOuse APP，打开设置。
- 点击灵敏度设置。
- 选择要调整灵敏度的设备。
- 调整鼠标、键盘和摇杆的灵敏度。

{注:鼠标可以单独调整X-Y轴}

10.3 节能模式

打开此模式，一次充电可以使用更长的时间，从而节省GlassOuse Link电量。

10.4 恢复为“出厂设置”

该选项可以一键使GlassOuse Link恢复出厂设置。