

# GlassOuse



Assistive Device

[www.glassouse.com](http://www.glassouse.com)

**GlassOuse Link**

Manual de usuario

## DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

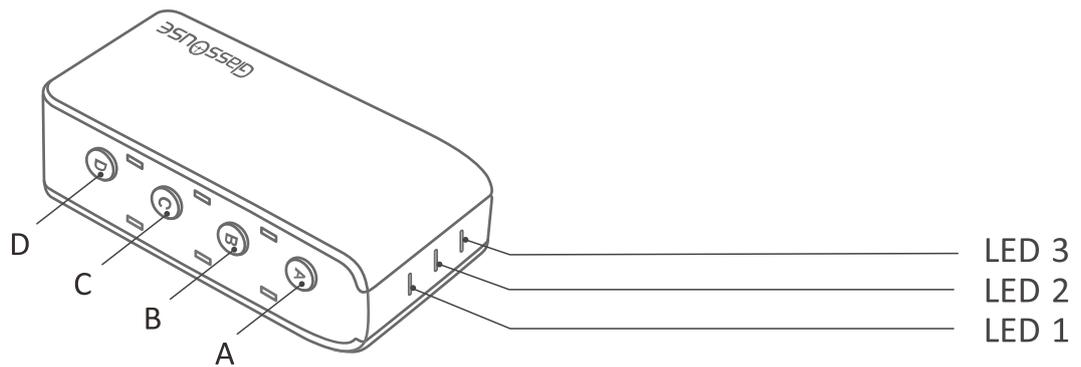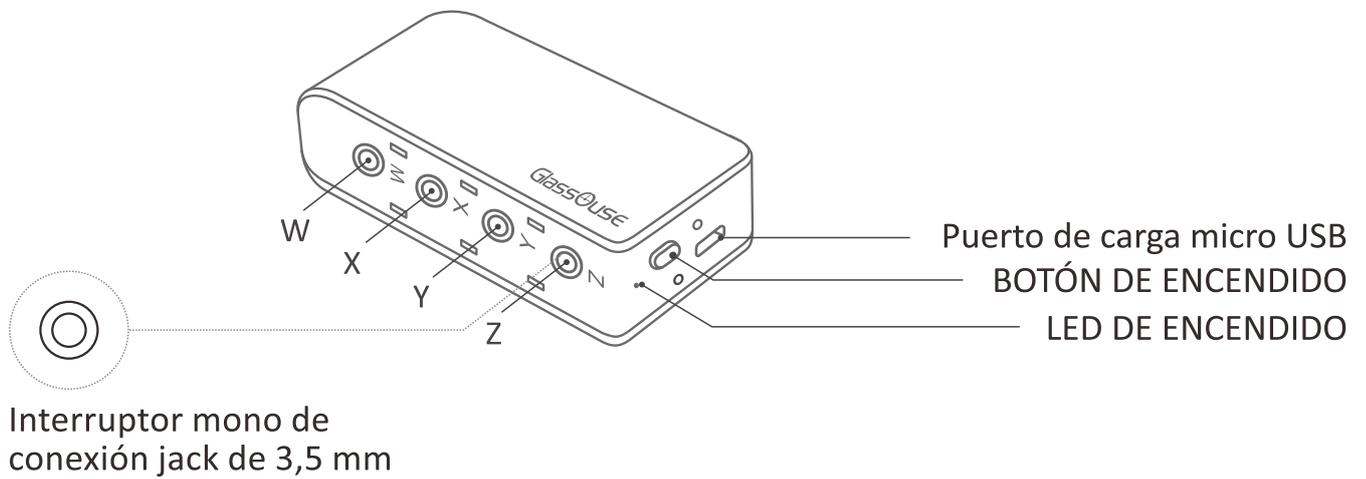

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN
Botón de encendido	Enciende y apaga el dispositivo
LED de encendido	Estado de la batería/carga
A	Alterna entre diferentes dispositivos
B	Cambia de modo entre Ratón, Conmutador y Joystick, mantener pulsado para emparejar
C	Cambia la sensibilidad del ratón

COMPONENTS	DESCRIPTION
D	Calibrar; mostrar el teclado
LED 1	Dispositivo 1
LED 2	Dispositivo 2
LED 3	Dispositivo 3
W, X, Y, Z	Puertos de conexión para conmutadores mono/duales
Puerto de carga USB	Carga el dispositivo

## 1. CONEXIÓN BT 4.0

---

Para conectar el GlassOuse Link mediante BT 4.0 a su dispositivo:

- Pulse el botón de “Encendido”. El LED 1 parpadeará.
- Pulse el botón B durante 3 segundos, el LED 1 empezará a parpadear más rápido.
- Busque y conéctese a “Axxx - M1 - GlassOuse Link” usando la opción de escaneo de su dispositivo.
- Cuando esté conectado, el LED 1 se quedará fijo en AZUL, indicando que GlassOuse Link está conectado como un ratón a su DISPOSITIVO.

## 2. CONECTAR EL GlassOuse Link A OTROS DISPOSITIVOS

---

- Pulse el botón A para conectarse a un dispositivo diferente. Observará que el LED 2 se pone de color AZUL
- Conecte el segundo dispositivo al GlassOuse a través de BT 4.0 pulsando el botón B durante 3 segundos y conectándose a “Axxx – M2 – GlassOuse Link” en la pantalla BT 4.0 de su dispositivo.
- Una vez establecida la conexión, el LED 2 se quedará fijo en AZUL, indicando que el GlassOuse Link está conectado como un ratón al DISPOSITIVO 2.
- De forma similar, puede conectar un tercer dispositivo al GlassOuse Link a través de BT 4.0.

\*Dispositivo hace referencia a un teléfono móvil, un portátil, una tableta o un Smart TV al cual GlassOuse se conecta y controla.

## 3. ALTERNAR ENTRE DISPOSITIVOS CONECTADOS

---

**Método 1:** Pulse A en el GlassOuse Link para cambiar entre los dispositivos conectados. El LED (1-3) correspondiente al dispositivo se iluminará.

**Método 2:** Active el conmutador de asistencia conectado al Puerto Z.

**NOTA:** Cuando conecte el GlassOuse a un nuevo dispositivo, dejará de funcionar en el dispositivo conectado anteriormente y cambiará al nuevo dispositivo.

## 4. USO EN EL MODO DE CONTROL DEL CONMUTADOR

---


- En el modo de conmutación, el GlassOuse Link puede configurarse como un conmutador externo utilizando el control de conmutación del dispositivo (Switch Access) o cualquier otro software de control de conmutación compatible con su dispositivo.
- A los conmutadores externos conectados al GlassOuse Link se les pueden asignar diferentes botones utilizando la aplicación GlassOuse.
- Para mostrar/ocultar el teclado en su pantalla, active el conmutador de asistencia conectado al puerto Y.

## 5. CONECTAR EL GLASSOUSE Link COMO RATÓN / CONMUTADOR / JOYSTICK

---

- El GlassOuse Link se puede conectar como Ratón, Conmutador o Joystick, conectando como cualquiera de las funciones a la vez a un dispositivo.
- Cada medio tiene un código de color definido:

Ratón	AZUL
Teclado	ROJO
Joystick	VERDE

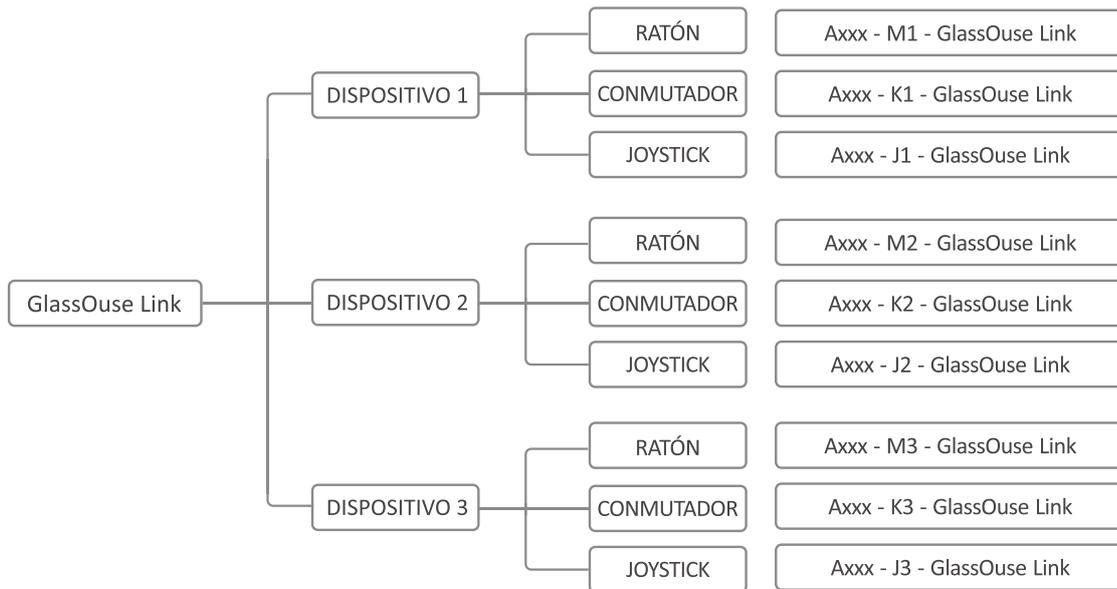

- Para cambiar la función en un dispositivo, pulse el botón B una vez (o utilice el conmutador de asistencia conectado al puerto Z). Observará que el color del LED de la función deseada parpadea.
- Mantenga pulsado B de nuevo durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento y conectarse con el dispositivo BT 4.0 seleccionado.

**NOTA:**

Se puede conectar un dispositivo a cualquier función a la vez.

## 6. CONECTAR G –SWITCHES

- GlassOuse Link dispone de cuatro puertos de conmutación para conmutadores adaptativos externos.
- Todos ellos soportan conmutadores Mono de 3,5 mm así como conmutadores Estéreo (Dual) de 3,5mm. Puede conectar dos conmutadores con diferentes comandos en un solo puerto para cualquier función activa (Ratón, Conmutador o Joystick).
- El puerto Z se utiliza para “Cambiar el dispositivo” o “Cambiar la función”, lo cual se puede configurar mediante la aplicación GlassOuse.
- Use la aplicación GlassOuse para cambiar la funcionalidad del conmutador o usar los botones físicos.

## 7. USO DE GlassOuse Link CON GlassOuse PRO Y GlassOuse V1.4

**Ratón**

- GlassOuse Link puede funcionar simultáneamente con GlassOuse PRO (modo ratón, conmutador y joystick) y GlassOuse V1.4 (sólo modo ratón) en el mismo dispositivo emparejado y actuar como un puerto de control de conmutador multiasistencial para ellos.

**NOTA: Un dispositivo puede tener generalmente 3-4 conexiones BT 4.0 activas**

- Para usar el GlassOuse Link con el GlassOuse PRO, asegúrese de que ambos GlassOuse estén conectados al mismo dispositivo y en el mismo modo y estén activos. Para usarlos juntos en otro dispositivo, cambie ambos GlassOuse al nuevo dispositivo simultáneamente.
- Use la APP GlassOuse para designar las funciones de los conmutadores de asistencia conectados al GlassOuse Link para todos los dispositivos emparejados.

## 8. ENCENDIDO

---

GlassOuse Link entrará en modo de ahorro de energía cuando no se use durante más de 15 segundos poniéndose en espera. Todas las luces indicadoras se apagarán. Después de 3 minutos en espera, si no se realiza ninguna acción, pasará a modo de suspensión. Para reactivar el dispositivo, pulse cualquier botón.

- **Indicador de batería baja** – El LED de encendido se pondrá ROJO y parpadeará rápidamente.
- **Cargando** – El LED de encendido parpadeará en ROJO lentamente.
- **Carga completa** – El LED de encendido se quedará fijo en ROJO.

## 9. REINICIO

---

Mantenga pulsado (D + Botón de encendido) durante 3 segundos para reiniciar.

## 10. APP GlassOuse

---

- Conecte el GlassOuse Link al dispositivo en el que ha instalado la app. Inicie sesión usando sus credenciales o “Cree una cuenta”.
- Seleccione el GlassOuse Link conectado en la app.

### 10.1 Configuración del conmutador de asistencia externa

Asigne las funciones de cada conmutador conectado a través del GlassOuse Link

- Abra los ajustes. Después, seleccione Ajustes de conmutadores.
- Seleccione PUERTO > Conmutador 1 o Conmutador 2 (el comando de conmutación que quiera cambiar).
- Dentro, puede cambiar los comandos de Ratón, Teclado y Joystick y configurarlos como desee.

### 10.2 Cambiar la sensibilidad

Puede ajustar la sensibilidad del ratón, el teclado o el joystick:

- Dentro de la app, abra Ajustes.
- Pulse en Ajustes de sensibilidad.
- Seleccione el dispositivo para el que desea ajustar la sensibilidad.
- Ajuste la sensibilidad del Ratón, el Teclado y el Joystick.

**{NOTA: Para el ratón, puede ajustar el eje X-Y por separado}**

### 10.3 Modo de ahorro de energía

Ahorre batería del GlassOuse Link activando esta opción para poder usarlo durante más tiempo con una sola carga.

### 10.4 Restablecer la configuración de fábrica

Puede restablecer la configuración de fábrica del dispositivo seleccionando esta opción.