



GlassOuse

Assistive Device

www.glassouse.com

GlassOuse PRO
使用手册

设备说明

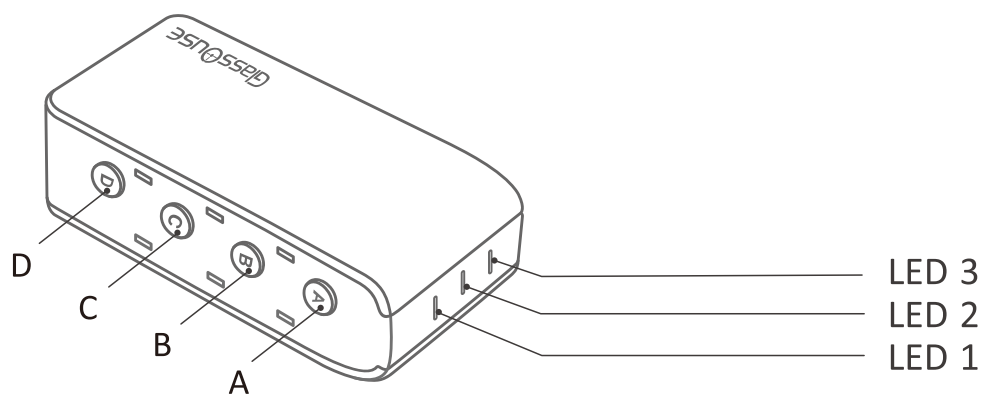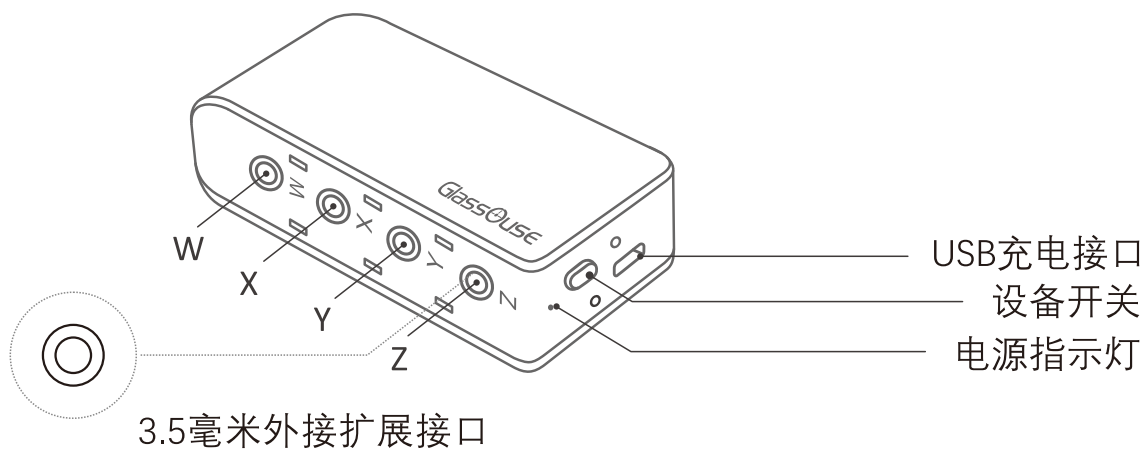

组件	说明
Power Button/电源按键	设备开关
Power LED/电源指示灯	充电状态指示
A	连接通道切换
B	短按模式切换，长按进行配对
C	灵敏度调节

组件	说明
D	校准；长按1秒以显示键盘（iOS）
LED 1	模式指示灯1
LED 2	模式指示灯2
LED 3	模式指示灯3
W, X, Y, Z	开关接口
USB 充电接口	设备充电

1. BT 4.0连接

通过BT 4.0连接GlassOuse到你的设备：

- 短按“电源”键开机。
- 短按A键选择连接通道。
- 短按B键选择模式， 长按3秒LED灯闪烁即进入配对状态。
打开智能设备的BT 4.0， 进入搜索界面， 找到“Axxx - M1 - GlassOuse PRO”并连接。
- 连接成功， LED指示灯状态长亮。

2. 多台设备连接GlassOuse PRO

- 短按A键， 指示灯会在通道对应的LED1、 2、 3间跳动。
- 选择想要连接的通道， 长按B键3秒进入配对状态， 并连接。

设备”指的是GlassOuse可以连接和控制的手机、电脑、平板电脑和智能电视等

3. 连接设备之间的切换


- 方法1:在GlassOuse PRO上短按A键切换连接设备， 设备通道对应的LED1、 2、 3会亮起。
- 方法 2:将开关连接到Z插口， 点击开关即可进行设备切换。

注意：当您将GlassOuse切换到新设备时， 它将停止在之前连接的设备上工作， 即不能同时在两台设备上工作。

4. GlassOuse PRO的鼠标/开关/摇杆模式

- GlassOuse PRO可以作为鼠标、 外置开关或摇杆。
- 每种模式都有专门的颜色:鼠标（蓝色）、 开关（红色）、 摇杆(绿色)

Mouse / 鼠标	蓝色
Keyboard / 开关	红色
Joystick / 摇杆	绿色

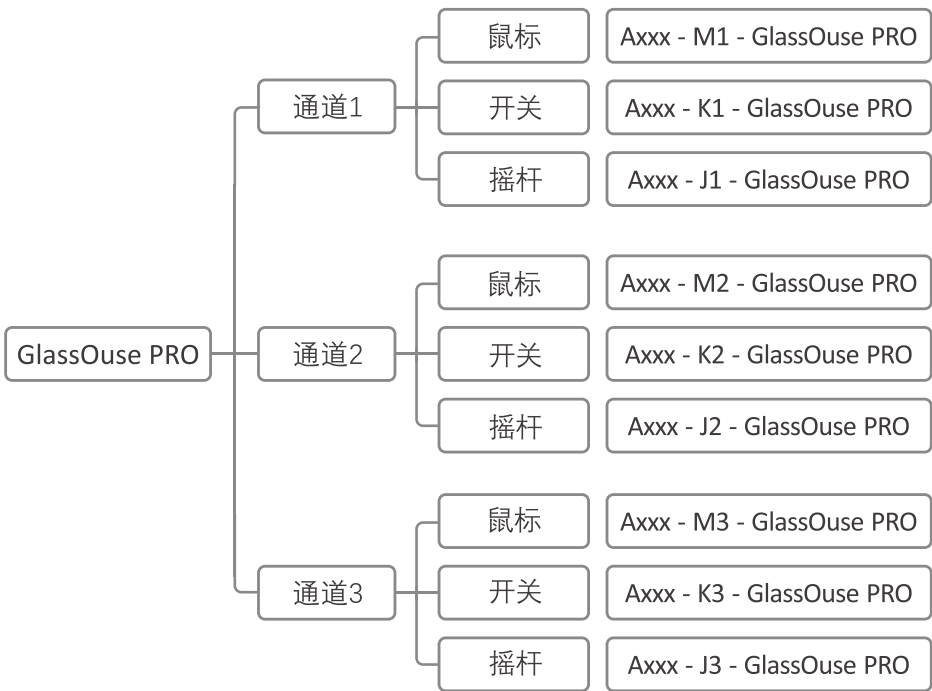

- 要切换模式，可以短按B键，切换的模式对应不同的LED灯颜色
- 再次长按B键3秒，进入配对状态，用BT 4.0连接。

注意：一个设备可以同时连接到任何一个功能。

5. 连接G-Switch开关

- GlassOuse PRO有四个开关接口，用于连接不同按键开关。
- 支持单声道3.5mm开关以及立体声(双)3.5mm开关。您可以在一个端口连接两个具有不同命令的按键开关，以实现鼠标、开关或摇杆的更多功能。
- Z插口默认是“切换设备”，可使用GlassOuse App设置成其它功能。
- 使用GlassOuse App可以更改设置每个插口每个开关的对应功能。

6. 鼠标、开关和摇杆功能

6.1 鼠标模式

- 当GlassOuse PRO作为鼠标时，屏幕上会出现一个光标，通过GlassOuse PRO的移动来控制。
- 您可以在GlassOuse App中设置连接开关不同的功能(如右键，左键，滚动等)来使用。
- 设置GlassOuse PRO鼠标光标的灵敏度，需长按C键，LED 2亮黄灯后，短按C键来选择灵敏度，选好后静等10秒便自动确定对应的灵敏度。也可以在智能设备上进入“光标速度”选项中设置。

灯	灵敏度
LED 1	高
LED 2	中等（默认）
LED 3	低

6.2 开关模式

- 在开关模式下，可以将GlassOuse PRO设置为智能设备的外置开关，通过开关就可以操控设备，通过ios系统中的（切换控制）或Android系统中的（开关控制）设置。
- 连接到电脑上，GlassOuse PRO可作为外置键盘使用，在GlassOuse App中可以设置键盘的任意键位。

6.3 摇杆模式

- 您可以在设备上使用摇杆模式玩游戏。(注:游戏必须支持摇杆功能)。
- 通过GlassOuse App为点击开关设置其它功能(如A键、B键、C键、D键、R1键等)。

7. 电量状态

- **休眠模式** - 当设备持续60秒无操作后，GlassOuse PRO将自动进入休眠状态。唤醒方式：轻摇设备或按任意按键。
- **低电量指示灯** - 电源指示灯将转为红色慢闪模式（约1次/秒），建议及时充电。
- **充电** - 电源指示灯呈红色并快速闪烁。
- **满电状态** - 电源指示灯保持红色常亮。

8. 重置

长按(D + 电源键)3秒，重置清空BT 4.0配对信息。

9. GlassOuse 应用程序

- 将 GlassOuse PRO 连接到已安装该应用程序的设备。使用您的账户凭证登录或选择“创建账户”。
- 在应用程序中选择已连接的 GlassOuse PRO。

9.1 外部按键设置

为 GlassOuse 连接的外部按键分配功能：

- 打开“设置”，然后选择“更改按键设置”。
- 在“端点 > 按键 1”或“按键 2”中选择要修改指令的按键（根据需求）。在此界面中，您可以修改并自定义鼠标、键盘和摇杆的指令。

9.2 调整灵敏度

可调整鼠标、键盘或摇杆的灵敏度：

- 在应用程序内打开“设置”。
- 点击“灵敏度设置”。
- 选择需要调整灵敏度的设备（鼠标、键盘或摇杆）。

注：您可以为鼠标单独设置 X 轴和 Y 轴的灵敏度。


9.3 节能模式

启用此模式可延长单次充电的使用时间，从而节省 GlassOuse PRO 的电量。

9.4 恢复出厂设置

选择此选项可将设备重置为出厂默认状态。

10. 校准说明

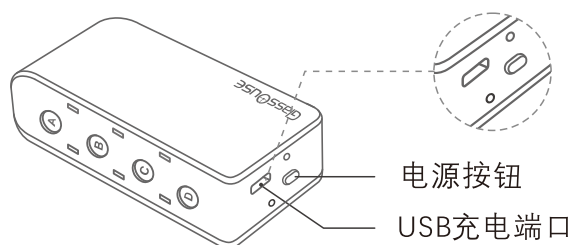

- **定位：**在开始校准前，请将GlassOuse PRO放置在平整表面上。
- **注意：**确保较宽的USB充电端口朝上放置。
- **开启GlassOuse应用：**启动GlassOuse应用程序，进入设置菜单。
- **选择校准：**在设置菜单右上角找到“校准”选项并点击确定。
- **校准成功：**当GlassOuse PRO的模式指示灯快速闪烁4次时，表示校准成功。此时应用界面将显示校准成功的确认提示。
- **校准失败：**若模式指示灯短暂闪烁后熄灭，则校准未完成。应用界面会弹出校准失败的警示通知。
注：在检测到自动漂移现象或完成固件升级后，请按照上述步骤重新校准设备。